

SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERAS PARA CUARTOS DE HOSPITALIZACIÓN EN CLÍNICAS Y HOSPITALES

El sistema de llamado de enfermeras MCall está diseñado para funcionar en el área de cuartos de hospitalización y permite que el paciente llame al personal médico de forma inmediata con sólo presionar un botón. Este sistema es inalámbrico y por lo tanto no requiere de cableados, picados de paredes ni canaletas permitiendo su instalación en pocas horas.

Fácil de usar:

Nuestros pulsadores de llamada, relojes-receptores, pantalla Led y estación de enfermeras son muy fáciles de usar, tanto para los pacientes como para el personal médico.

Atienda siempre los llamados:

Con múltiples alertas, sus pacientes y familiares pueden estar seguros de que cada llamada será atendida de manera oportuna.

Pacientes más seguros:

Bríndeles a los pacientes una manera fácil de solicitar asistencia con sólo presionar un botón, manteniéndolos más relajados y seguros en todo momento.

1 ¿CÓMO FUNCIONA?

En el Sistema con visualización de llamadas intercaladas:

En el Sistema con visualización de llamadas intercaladas cada vez que un paciente llama a través del pulsador instalado en el cuarto la llamada se registra en la pantalla Led de 3 dígitos indicando el número del cuarto, si varios pacientes llaman al mismo tiempo la numeración de los cuartos rotaran e irán desapareciendo luego que la enfermera cancele la llamada. En los relojes que llevan las enfermeras también aparecerá el número de habitación y será eliminado una vez que la enfermera cancele la llamada en el pulsador del cuarto.



2 Pulsador de Llamada de paciente desde la cama con clave azul:

Se instala en la pared junto a la cama un pulsador con botón de llamada, clave azul y cancelación (X) además de una extensión elástica para que el cliente al sólo presionar genere una llamada que llega inmediatamente a los relojes-receptores de las enfermeras. Simultáneamente el llamado llegará a la pantalla led o monitor Android ubicado en la estación de enfermera.



3 Pulsador de Baño:

Un botón especialmente diseñado para dicho ambiente (resistente al agua y vapor) se instala en la pared del baño ubicado entre el inodoro y ducha para casos de emergencia como caídas en que el paciente requiera ayuda, este se activa con sólo jalar la cuerda roja.

La llamada llegará tanto a la pantalla o monitor de la estación de enfermeras, como a los relojes-receptores indicando que el paciente pide ayuda desde el baño.



4 Estación de enfermeras: Pantalla LED alfanumérica con 3 dígitos (Sistema con visualización de llamadas intercaladas):

Esta pantalla es instalada en la estación de enfermeras y muestra los números de los cuartos de los pacientes que están llamando, si varios pacientes llaman al mismo tiempo la numeración de los cuartos rotará.



5 Luz indicadora para pasillos :

El sistema permite además instalar en los marcos de las puertas de los cuartos una luz indicadora que se prende al momento que el paciente presiona el botón de llamado. Esta ayuda visualmente a las enfermeras a ubicar de inmediato el cuarto desde donde se originó al llamado para que la asistencia sea más rápida. Esta luz indicadora cuenta también en caso se requiera de una alerta sonora con diferentes tipos y tiempos de timbrado. La luz (posee 4 colores distintos).



6 Alcance del sistema :

No importa que tan largos sean los pasillos de la clínica u hospital, por medio de nuestras repetidoras las señal llegará desde todos los cuartos hasta la estación de enfermeras.





www.technistore.com

421 5192 / 9924 56195

ventas@technistore.com

Calle 8 de Octubre 165 Miraflores. Alt. cdra. 8 de Av. Del ejército.

